


【サイズ表】

サイズ	適用範囲（ウエストサイズ）
M	65～85cm
L	80～100cm
LL	95～115cm

※身長の適用範囲は150～190cmです。

●サイズの選び方

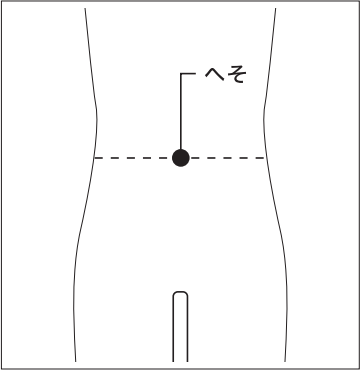

適用範囲（ウエストサイズ）は目安となります。
ウエストサイズに合わせて選んでください。
ウエストサイズはへその位置を目安に計測してください。
計測値がサイズをまたがった場合、
締め付け感の好みに合わせてサイズを選んでください。

※本製品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
※製品の仕様、外観などは改良のため予告なく変更することがあります。
※製品には万全を期しておりますが、万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。



https://www.mediaid-online.jp
お客様窓口：TEL.0800-111-3410（通話料無料）
受付時間：10時～17時（平日）※土日、祝日、年末年始を除く

2025.02
138210



メディエイド アシストギア 腰2

使用説明書

安全にご使用いただくために、必ずご使用前に本使用説明書をお読みください。
またいつでもお読みになれるよう保管してください。


【注意事項】

- 本製品は治療用の製品ではありません。また、使用状況によって、サポートできない場合があります。
- 本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。
- アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方、装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹などの異常がある場合は使用しないでください。
- 血行障害や負傷事故の原因になりますので、次のことを必ず守って使用してください。
 - ・作業アシスト以外の用途で使用しないでください。
 - ・サイズの合った製品を使用してください。
 - ・妊娠中または妊娠していると思われる場合は、医師に相談してください。
 - ・装着手順に従って正しく使用してください。
 - ・ベルトやテープをきつく締めすぎないでください。
 - ・使用中にゆるんだりずれたりした場合は、正しく装着し直してください。また、長時間使用する場合は、過度の圧迫などに注意し、適宜装着し直してください。
 - ・本製品が摩耗、損傷した場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
 - ・伸縮パーツや生地伸縮性がなくなった場合は、使用しないでください。
 - ・面ファスナーやバックルを外したまま、作業しないでください。
- 本製品の使用中に、ケガ、骨折、痛み、しびれ、腫れ、湿疹などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用を続けると症状が悪化する原因となります。
- バックル着脱時は、指を挟まないよう注意してください。
- 面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意してください。
- 本製品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。
- 本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地色移りする場合があります。
- 面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

【お手入れ方法】

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地色移りする場合があります。
- 本製品は洗濯ネットに入れて、洗濯機で洗えます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
- 面ファスナーをとめて洗濯してください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
- アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
- 乾燥機は使用しないでください。製品をいためる原因となります。
- 本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【各部の名称】

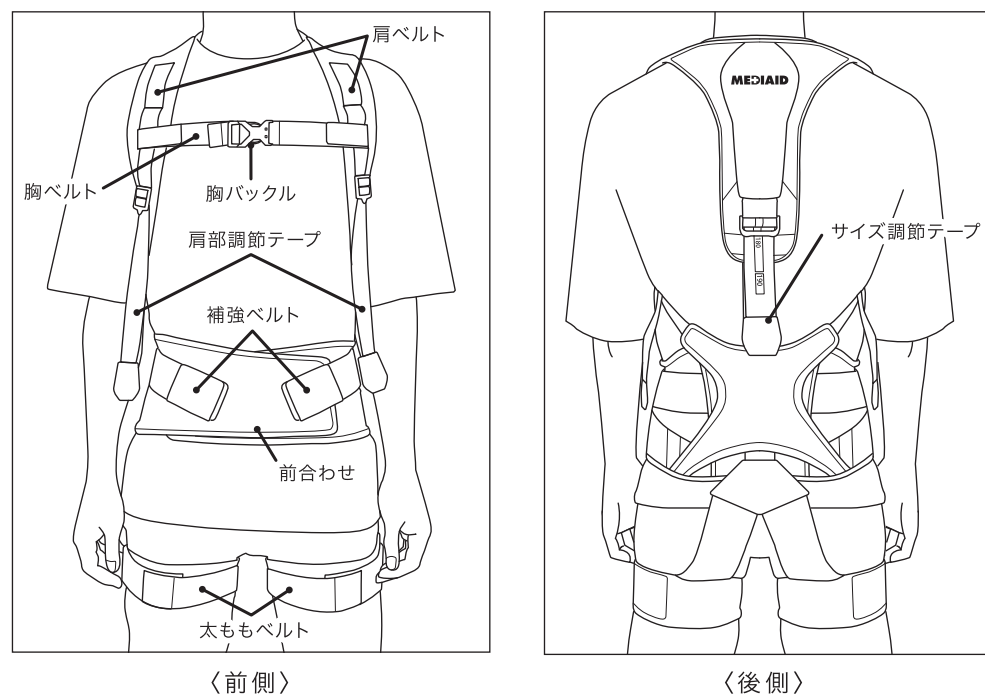


【装着方法】


- ① 身長に合わせてサイズ調節テープを調節します。アジャスタ先端部にメモリを合わせてください。図は身長が170cmの場合です。




- ② 肩ベルトに腕を通します。

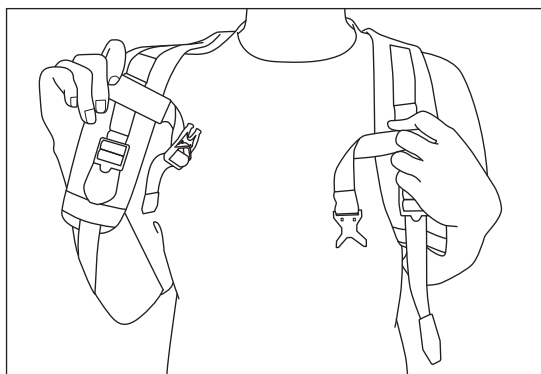


- ③ 胸バックルをとめます。

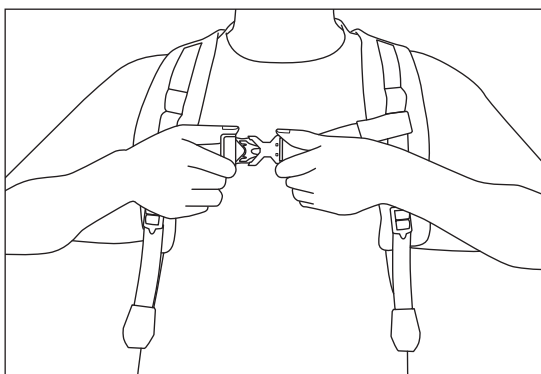


- ④ 太ももベルトを引っ張り、とめます。ずれ上がらないよう可能な限り太ももの付け根付近にとめてください。

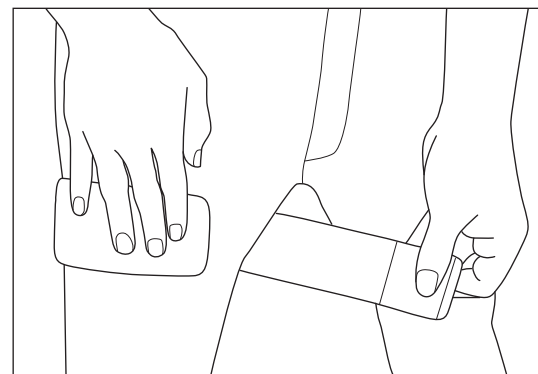



- ⑤ 前合わせを引っ張り、とめます。

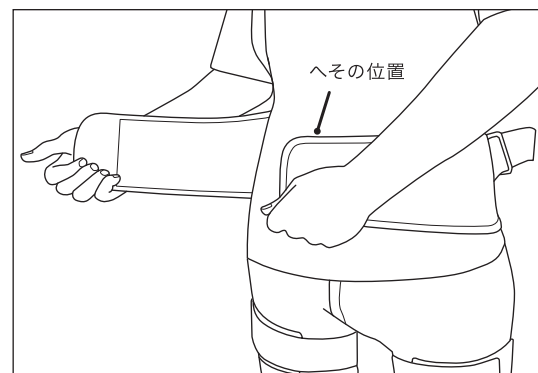


- ⑥ 補強ベルトを引っ張り、とめます。

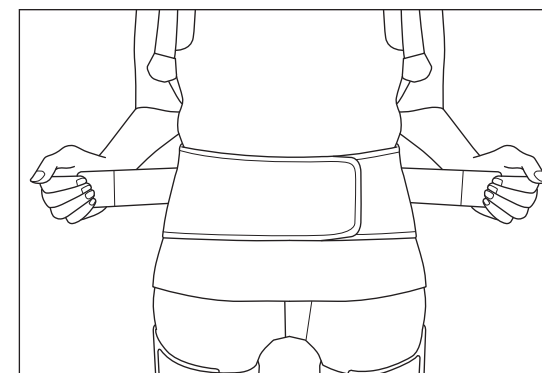


- ⑦ 肩部調節テープ、胸ベルトを引っ張って調節し、体にフィットさせます。

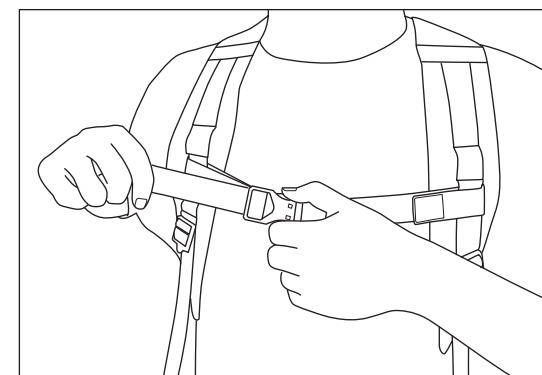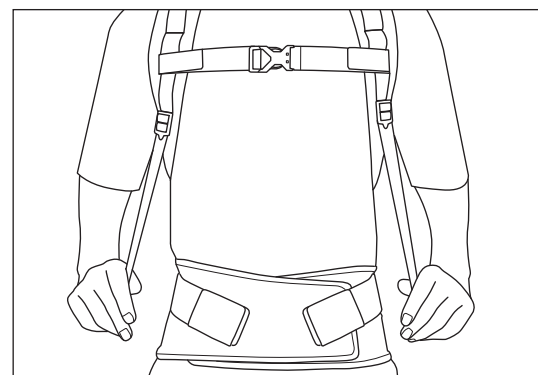


※胸ベルトは好みの高さに調節できます。

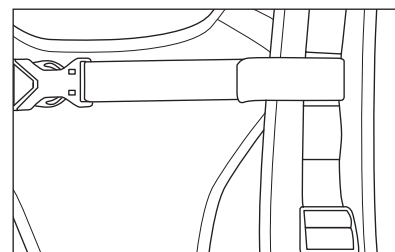

〈高〉

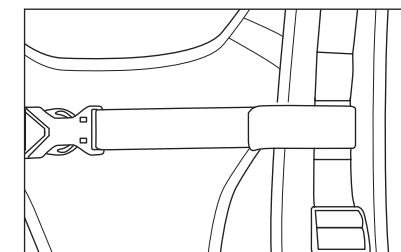

〈中〉

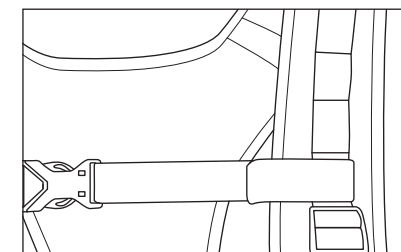

〈低〉